









GUIA RÁPIDO FREEDOM CONNECT

1. Barra de Ferramentas

-  → Conecta/Desconecta o Freedom Connect à Cadeira.
-  → Restaura as configurações de fábrica da Cadeira.
-  → Salva as configurações da Cadeira em um arquivo.
-  → Carrega as configurações da Cadeira de um arquivo.
-  → Envia relatório da Cadeira para a Freedom.
-  → Configura dados do Usuário e Rede.
-  → Imprime relatório com configurações e informações da Cadeira.
-  → Exibe o registro de Eventos da Cadeira (*)

(*) Disponível apenas no Modo Assistência Técnica

2. Painel de Informações

Exibe informações da Cadeira como:






- Número de Série do Painel e do Drive;
- Versão de Firmware e Hardware do Painel e do Drive;
- Motorização;
- Horas de Uso dos Motores;

3. Painel de Status

Exibe se existe algum erro ativo na Cadeira:

- OK: Cadeira sem erros;
- ALERTA: Cadeira com erro (Pressione o botão para detalhes).

4. Painel de Configurações

-  → **Desligamento Automático**
Habilita/Desabilita o desligamento automático da Cadeira após 10 minutos.
-  → **Alerta de Roda Livre**
Habilita/Desabilita o sinal sonoro que é emitido quando a cadeira está em Roda Livre.
-  → **Velocidade**
Atenuador da velocidade final da cadeira. No nível máximo a Cadeira está sem atenuação, ou seja, utiliza 100% da potência do motor.
-  → **Aceleração Modo Econômico / Modo Turbo**
Nível de aceleração da Cadeira. Quanto mais alto, mais rápida será a resposta da Cadeira.
-  → **Curva**
Nível de velocidade em curva. Quanto menor, mais lenta será a resposta da Cadeira nas curvas.

-  → **Farol (*)**
Habilita/Desabilita o botão de acionamento do farol da Cadeira.
-  → **Joystick Reverso (*)**
Habilita/Desabilita o Modo de Joystick Reverso, onde o eixo frente-ré fica invertido.
-  → **Temporizador do Modo Turbo (*)**
Habilita/Desabilita o desligamento automático do Modo Turbo após 1 minuto de sua ativação.
-  → **Modelo do Motor (*)**
Seletor de motorização da cadeira. Configura o Drive para a motorização selecionada.
-  → **Modo Torque+ (*)**
Habilita/Desabilita o modo especial onde o Drive libera mais potência para os motores aumentando a força.
-  → **Bloqueio de Assento elevado (**)**
Habilita/Desabilita o bloqueio da cadeira quando o assento da mesma encontrar-se levantado.

(*) Configurações disponíveis apenas no Modo Assistência Técnica

(**) Configurações disponíveis apenas no Modo Assistência Técnica para modelos Millennium.

5. Botão de Leitura

Lê os parâmetros de configuração atuais da Cadeira.

6. Botão de Escrita

Envia para a Cadeira as configurações que foram alteradas pelo Usuário.

